

Овлажняващ и успокояващ разтвор за очи и контактни лещи  
АВАК® бутилка без консерванти

#### СЪСТАВ

Натриев хиалуронат

Натриев хлорид, актинокинол, трометамол, хидрохлорна киселина, вода за инжекции

#### ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Laboratoires Thea, 12 rue Louis Bleriot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Франция

#### КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ ПРОДУКТ

НУАВАК ПРОТЕСТОР е хипотоничен разтвор предназначен да бъде прилаган върху окото или контактна леща. Съдържа хиалуронова киселина (успокояващо и овлажняващо средство) и актинокинол (вещество с анти UV свойства)

НУАВАК ПРОТЕСТОР се препоръчва:

За да овлажни и успокои окото при усещане за сухота или умора предизвикани от външни фактори като: вятър, пушек, замърсяване, прах, суха топлина, климатик, пътуване в самолет, продължителна работа пред екран на компютър.

За лица ползващи контактни лещи. Той спомага успокояването и овлажняването на лещата за да се олесни поставянето и отстраняването и осигурява незабавен комфорт при носенето и през деня.

НУАВАК ПРОТЕСТОР, благодарение на АВАК системата може да разпределя капки от несъдържащ консервант разтвор. Ето защо той може да бъде използван с всеки тип контактни лещи. Липсата на консервант също способства за защитата на очната тъкан.

#### СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Не използвайте ако сте алергични към някоя от съставките

Избягвайте контакт на окото с върха на бутилката

Не инжектирайте, Не поглъщайте

UV филтъра не замества носенето на слънчеви очила

Не използвайте продукта при повреда на обезопасяващия пръстен

ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА